

**An alle Stationen und Ambulanzen
der Universitätsmedizin Essen**

Zentrallabor
akkreditiert nach
DIN EN ISO 15189



Leiter: Dr. med. M. Wichert

Betreff: Röhrchenumstellungen im Zentrallabor zum 01.06.2026

Tel. +49 (0) 201 723 5040

Fax +49 (0) 201 723 5057

marc.wichert@uk-essen.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 31.03.2026 haben wir Sie per Rundschreiben informiert, dass wir am **Montag, den 01.06.2026** folgende Röhrchenumstellungen im Zentrallabor durchführen werden:

Sekretariat:

Dorothee Hausmann

Tel. +49 (0) 201 723 2301

Fax +49 (0) 201 723 5052

1. Umstellung des Untersuchungsmaterials für ca. 90 klinisch-chemische und immunologische Parameter des Zentrallabors von Serum auf Li-Heparin-Plasma
2. Umstellung der Citrat-Monovette für die Gerinnungsdiagnostik von 5,4 auf 4,3 mL

Zentrallabor 1. OG, Zimmer 1.03

7. Mai 2026

Seite 1 von 2

Das Informationsschreiben ist auf der Homepage des Zentrallabors unter <https://zentrallabor.uk-essen.de/aktuelles> zu finden.

Folgendes gilt es bei den Bestellungen der Artikel zukünftig unbedingt zu beachten:

Universitätsklinikum Essen
Hufelandstraße 55
45147 Essen

1. Bestellung der neuen Li-Heparin-Gel-Monovetten

Tel. +49 (0) 201 723 0

Fax +49 (0) 201 723 46 94

Die neuen Li-Heparin-Gel-Monovetten, die ab dem 01.06.2026 benötigt werden, erhalten Sie in Zukunft über das Zentrallager. Aufgrund aktueller Lieferschwierigkeiten der Firma Sarstedt können diese erst ab **Montag, den 18.05.2026** über das GHX-Bestellsystem angefordert werden. Die neuen Li-Heparin-Gel-Monovetten sind unter folgenden SAP-Nummern dort zu finden:

info@uk-essen.de

www.uk-essen.de

Art.-Nr.	Artikel	SAP-Nr.
01.1634	S-Monovette Lithium Heparin Gel LH, 7,5 mL	36438641
04.1928	S-Monovette Lithium Heparin Gel LH, 2,7 mL	36438642
20.1346	Microvette 500 Lithium Heparin Gel LH, 500 µL	36438643
20.1309	Microvette 300 Lithium Heparin LH, 300 µl	36438965

Wichtig:

Die Umstellung des Untersuchungsmaterials von Serum auf Li-Heparin-plasma erfolgt erst am Montag, den 01.06.2026! Bis dahin werden die von der Umstellung betroffenen Laboranalysen (Infoschreiben vom 31.03.2026) weiterhin aus Serum gemessen! Bitte achten Sie daher auch auf einen ausreichenden Vorrat an Serum-Gel-Monovetten bis zum Tag der Umstellung! Die Vorab-Verfügbarkeit über das GHX-Bestellsystem

dient nur der frühzeitigen Bestückung Ihres Vorratslagers mit den neuen Li-Heparin-Gel-Monovetten!

Serum-Monovetten werden ab dem 01.06.2026 weiterhin für serologische Spezialanalytik benötigt und dürfen nicht entsorgt werden! Überbestände in Originalverpackung können jedoch nach der Umstellung an das Zentrallager zurückgeschickt werden.

2. Umstellung der Citrat-Monovette: 5,4 mL auf 4,3 mL

Die Citrat-Monovette, die ab dem 01.06.2026 benötigt wird, erhalten Sie in Zukunft über das Zentrallager. Aufgrund aktueller Lieferschwierigkeiten der Firma Sarstedt kann diese erst ab **Montag, den 18.05.2026** über das GHX-Bestellsystem angefordert werden. Die Citrat-Monovette ist unter folgender SAP-Nummer dort zu finden:

Art.-Nr.	Artikel	SAP-Nr.
04.1922	S-Monovette Citrat 9NC, 4,3 mL, 13 x 75/91 mm	36438905

Wichtig:

Die Umstellung auf die neue 4,3 mL-Citrat-Monovette erfolgt erst am Montag, den 01.06.2026! Bis dahin darf nur die derzeitige 5,4 mL-Citrat-Monovette verwendet werden! Bitte achten Sie daher auch auf einen ausreichenden Vorrat an 5,4 mL-Citrat-Monovetten bis zum Tag der Umstellung! Die Vorab-Verfügbarkeit über das GHX-Bestellsystem dient nur der frühzeitigen Bestückung Ihres Vorratslagers mit den neuen Monovetten!

Überbestände an 5,4 mL-Monovetten müssen bitte am 01.06.2026 eigenständig entsorgt werden!

3. Allgemeiner Hinweis für Einsender der RLK und des SJK

Analog zum Vorgehen am UK Essen werden die neuen Monovetten im Einkauf der RLK ab **Montag, den 18.05.2026** bestellbar sein. Auch hier dürfen die neuen Monovetten erst ab **Montag, den 01.06.2026** verwendet werden.

Bei Rückfragen zur Beschaffung können Sie sich gerne bei Herrn Voss im Einkauf der RLK unter Tel. 433-2111 melden.

Für weiterführende Informationen steht Ihnen der AvD des Zentrallabors unter Tel.: 85661 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. M. Wichert
Leiter Zentrallabor